


TSK

ONECUT

ワンハンド型自動生検針
ワンカット

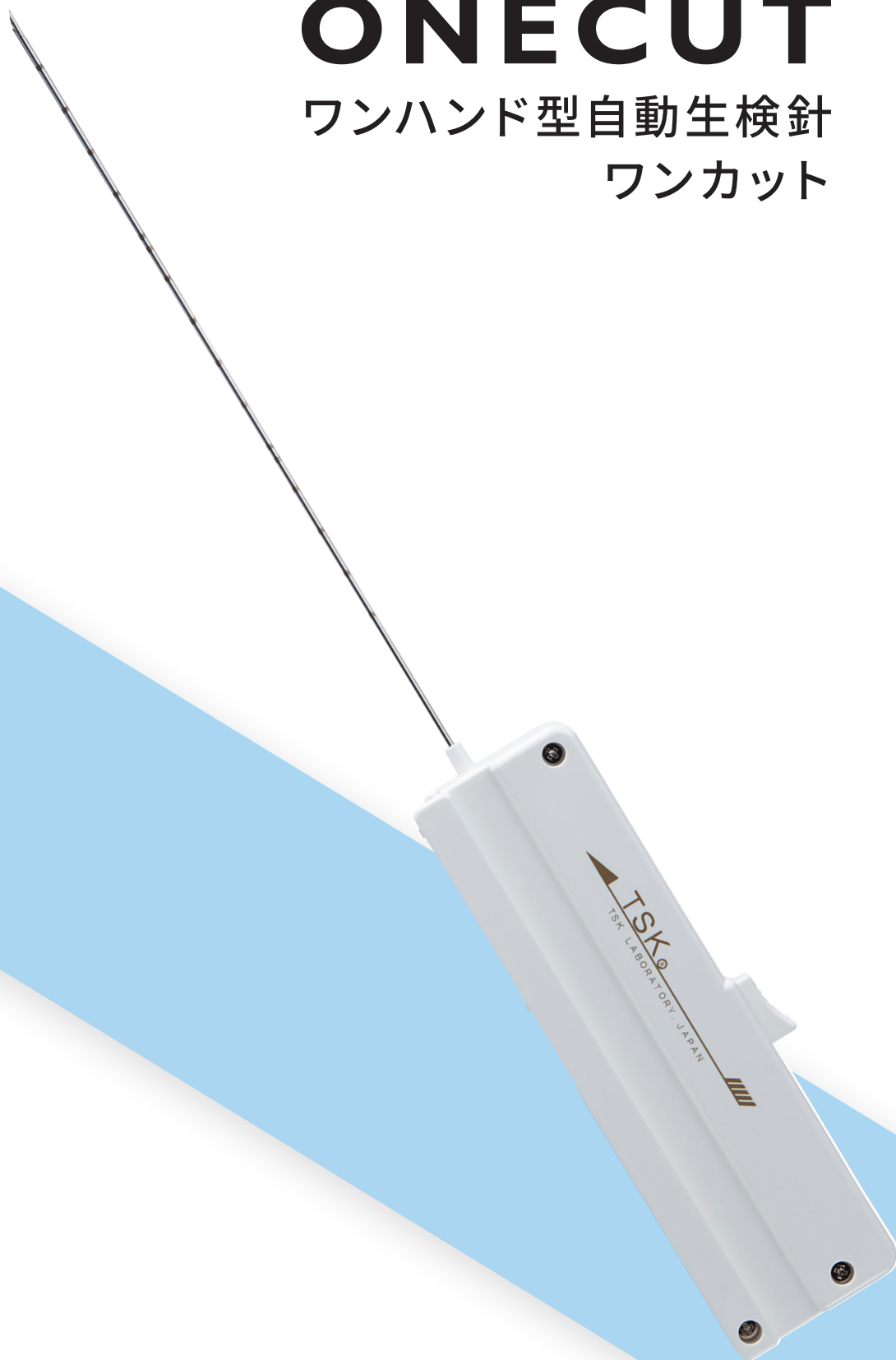

信頼できる技術を、世界へ

ONECUT

ワンハンド型自動生検針ワンカット

ワンハンド型自動生検針ワンカットは、検査、治療又は診断のため、人体に穿刺し、軟部組織採取に用いる片手操作が可能な単回使用生検針です。

使用方法

※ご使用前に最新の電子添文をご確認ください。

1



レバー1を“カチッ”と音がするまで引きます。

2



次に、レバー2を“カチッ”と音がするまで引きます。

3



生検部位直前まで穿刺し、スタートボタンを押し下げます。内針、外針が突出します。

4



体内から抜針後、レバー1を“カチッ”と音がするまで引き下げ、組織を内針より取り出します。

POINT

組織を取り出し後は、次の生検に備え必ずレバー2を“カチッ”と音がするまで引き下げてください。

製品規格

サイズ		品番	
太さ	有効長	16mm	22mm
16G	75mm	ONE-160753	ONE-161502
	75mm	ONE-181503	ONE-180752
	150mm		ONE-181502
18G	200mm	ONE-182002	ONE-182002

販売名:ワンハンド型自動生検針(ワンカット)
医療機器認証番号:21600BZZ00517000
単回使用 クラスII 管理医療機器
EOG滅菌 5本入り/箱



株式会社タスク
TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売元 株式会社タスク

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1510-1

TEL:0282-27-0005 FAX:0282-25-6511